ACCUNIQ MANAGER 사용 설명서





목 차

시작하기	4
시스템 요구사항	4
1. 센터 계정 등록 하기	4
2. 로그인 하기	5
3. 장비 연결하기	5
4. ACCUNIQ MANAGER 화면 안내	5
회원 측정하기	6
측정 시작하기	6
연속 측정하기	6
치의 추저 경기보기	_
외원 국경 '을파도기	/
측정 결과 상세보기	7
측정 결과 관리하기	7
회원 관리하기	9
회원 추가하기	9
회원의 누적그래프 보기	9
회원 정보 보기와 메모하기	10
회원리스트 정렬하기	10
회원 정보 관리하기/내보내기	10
회원 검색하기	11
센터계정 관리하기	12
세터저비 과리하기	13
신하 승수 전대에서 세터 리기에 하기	12
센터 계정 아이디 찾기	12
세터 계정 비밀버ㅎ 찬기	12
	12



회원리스트 사용자지정	14
USB 장비 연결	14
버전	14
추가 정보	15



시스템 요구사항

- PC 운영체제: Windows 7 (32 비트/64 비트), Windows 8 (32 비트/64 비트), Windows 10 (32 비트/64 비트)
- 사용환경: CPU 1Ghz, RAM 1GB 이상
- 해상도: 최소 1280x768 이상
- 인터넷: 프로그램의 최신버전 업데이트와 계정 및 회원관리를 위해서 인터넷 연결이 필요
- 1. 센터 계정 등록 하기
- ACCUNIQ MANAGAER 를 실행 후, 로그인 화면에서 센터가입을 선택합니다.

CCUNIQ MANAGER	×
아이디	
비밀번호	_
□ 로그인 상태 유지	
확인	
아이디 찾기 🕴 비밀번호 찾기 (센터가입)	

❷ 센터정보 입력에서 아이디, 비밀번호, 센터 이름, 센터 주소, 전화번호를 입력합니다.센터 아이디는 최초 등록 후 변경이 안되므로, 신중하게 선택해주십시오

		아이디		
	ACCUNIG	비밀번호	비밀번호	확인
		센터 이름		
센터 주소		나머지 주소	R STREET, JD	
전화번호		이메일	P	직접입력 ~
로고등록 (선택)	업로드할 파일을 선택하세요. 로그	1 원장 사이즈는 296*70 입니다.		찾아보기

 이메일 정보는 센터 아이디와 비밀번호 찾기 시 이용되므로, 반드시 유효한 이메일을 입력해주십시오

❹ 센터정보의 로고는 296x70 사이즈에 적합한 JPG, JPGE, PNG, GIF 파일을 등록합니다.

⑤ 모든 정보를 입력 후 확인을 선택하여 센터를 등록을 완료합니다



2. 로그인 하기

아이디		
diotek		
비밀번호		
☑ 로그인 상태 유기	지	
	확인	

● 센터 계정 등록 시 입력하신 아이디와 비밀번호로 로그인 하실 수 있습니다.

❷ 로그인 상태 유지 체크박스를 선택하시면, 다음 프로그램 실행부터 로그인 정보 입력 없이 바로 사용할 수 있습니다.

3. 장비 연결하기

● 체지방측정기 전원을 킨 후, USB 로 PC 와 연결합니다.

- ❷ 홈 화면에서 ♬ 장비연결 아이콘을 선택합니다.
- ❸ 연결된 USB 기기에서 장비를 선택합니다.

일반	연결	
장비	연결된 USB 기기	O Searching
데이터관리	JMicron USB to ATAPI Bridge	[0100]
버전	िं पुं Seagate Backup Plus-ATAP[02	201]
도움말	Brother MFC - USB-PR01234	
	Brother MFC - XXXXX-Printer	

❹ 연결이 완료되면, 장비연결 아이콘이 ☑ 변경됩니다.

4. ACCUNIQ MANAGER 화면 안내

- 🖸 프로그램의 홈 화면으로 등록된 전체 회원리스트를 확인합니다.
- 4 회원을 추가합니다. 회원관리 하기>회원추가 하기 항목을 참조하십시오
- ④ 여러 명의 회원 대상으로 연속으로 측정할 수 있는 기능입니다. <u>회원측정 하기></u>
 연속측정 하기 항목을 참조하십시오
- 도 장비 연결하기 바로가기 입니다. 환경설정 하기>USB 장비연결 항목을 참조하십시오
- •

 •



회원 측정하기

측정 시작하기

- 회원 리스트에서 측정을 원하는 회원을 선택 합니다.
- 회원 정보 화면에서 측정을 선택합니다.
- 측정이 시작되면 기기의 음성 안내에 따라 측정을 합니다.
- 측정 완료 후 결과보기를 선택하여 측정결과를 확인합니다.



연속 측정하기

- 여러 명의 회원을 연속적으로 측정할 수 있습니다.
- 회원리스트에서 연속 측정을 할 회원들을 복수 선택합니다.
- 오른쪽 하단의 🙆 연속측정 아이콘을 선택합니다.
- 안내에 따라 연속으로 측정을 시작합니다.





회원 측정 결과보기

측정 결과 상세보기

• 회원리스트에서 원하는 회원의 **마지막활동**을 선택합니다.

• 왼쪽의 **활동** 탭에서 회원의 측정 내역을 확인 할 수 있습니다. 내역의 항목 선택 시 우측에 해당 날짜의 측정결과를 확인할 수 있습니다.



• 분석결과는 종합평가, 골격근.지방.비만분석, 체성분분석, 복부비만 분석, 세포내외수분비 등의 분석결과를 제공합니다. (지원되는 기기에 따라 분석 결과 다를 수 있음)

• **누적그래프**는 3 개월/6 개월/1 년사이의 회원의 체성분, 체중, 근육량, 체지방률에 대한 누적그래프를 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 결과지보기는 체지방측정 결과 인쇄 미리보기를 제공합니다.

• 만 18 세 미만의 소아의 경우, 신장과 체중에 대한 분석결과 그래프를 제공합니다.

측정 결과 관리하기

측정 결과 t15	Home > 측정 결과 > 분석결과 BC730
분석결과 누적 그래프 결과지 보기	
종합 평가	

■는 메모하기 기능입니다. 회원 특이사항을 메모로 남길 수 있습니다.

ⓒ는 재측정 하기입니다. 아이콘 선택 시, 체성분 측정을 진행합니다.

●는 현재 화면의 측정결과를 삭제할 수 있습니다.

▷ ● QR 코드 스캔화면입니다. 회원의 스마트폰으로 QR 코드를 인식하면, 해당 측정결과를 스마트폰 화면에서 확인할 수 있습니다.



●는 결과지를 프린트 합니다. 해당 PC 가 프린터에 연결되어야 합니다.

●는 해당 측정결과와 회원 정보를 이메일로 전송할 수 있습니다 (PC 내 MS 아웃룩이 설정된 경우에 한함)



회원 관리하기

회원 추가하기

- 홈 화면에서 📕 회원추가를 눌러 회원 정보를 입력합니다.
- 회원 추가하기 화면에서 측정 버튼을 눌러 바로 회원의 체성분 측정을 시작할 수 있습니다.
- 다음회원 입력 버튼을 눌러 연속적으로 회원을 추가할 수 있습니다.

회원의 누적그래프 보기

• 회원리스트에서 오른쪽의 아래화살표를 선택하면, 누적그래프를 볼 수 있습니다.



• 누적그래프에서 양쪽 화살표를 선택하면 측정된 체중, 체지방량, 근육량 추이를 그래프로 확인 가능합니다.

원	리스트	L							
	28	선수번호	이쿱	포지션	생년월일	신장	용무계	메모	
2	1군	-	±: t1	투수	1996.01.01	111.0	25.4	25.4	
	-	누적그래	프 근육량						
		25 0.5							
	1	1							-
	(27			0				C
		5-0.5			1				2
	L				000				

회원 추가 화면에서 회원의 목표체중과 목표일을 설정 시, 누적그래프 오른편에 표시됩니다.
체지방량과 근육량의 경우, 목표 체중과 신장을 기준으로 적정 값의 체지방량과 근육량을 자동으로 계산하여 표시됩니다.





• 만 18 세 미만의 소아 회원의 경우, 체중과 신장에 대한 그래프를 확인할 수 있습니다.

회원 정보 보기와 메모하기

- 회원 리스트에서 오른쪽 마우스 클릭 시 회원정보 확인, 메모추가, 회원삭제 메뉴를 확인할
 수 있습니다.
- 측정된 회원에 대한 간단한 메모를 작성하고 확인 할 수 있습니다.

		• • •		
★ 강마을	801010	남	180	70
★ 강마을	 회원 정보	남	180	70
★ 강마을	메모	남	180	70
★ 강마을	삭제	남	180	70
★ 강마을	801010	남	180	70

회원 리스트 정렬하기

• 회원리스트에서 제목열의 항목 선택 시 리스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.

- 회원 ID, 그룹명, 이름, 연령, 성별, 마지막 활동 선택 시, 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

회원리스트						
명 이름						
★ 이회원						
★ 김나라						

회원 정보 관리하기/내보내기

- 홈 화면의 회원리스트에서 체크박스로 회원을 선택합니다.
 - 전체 선택하기: 제목열의 오른쪽 체크박스 선택 시, 전체 회원이 선택됩니다.

회원	리스트								
	회원 ID	그룹명	이름	마지막 활동 ▼	몸무게	나이	생년월일	메모	성별
	2		★ 김나라	2016.07.25 가입	88.0	26	1990.01.01	1	남자
	1		🔹 이회원	2016.07.25 가입	80.0	17	1999.01.01	7	남자
	1		🚖 이회원	2016.07.25 가입	80.0	17	1999.01.01	7	남자

- 일부 선택하기: 각 회원 별로 체크박스로 회원을 선택합니다.



회원리스트							۲
	회원 ID	그룹명	0	이름	마지막 활동▼	몸무게	
	1		- the C	이회원	2016.07.25 가입	80.0	^

- 🕐 아이콘을 선택하여 선택된 회원정보를 수정합니다 (한명 선택 시에만 가능)
- • 아이콘을 선택하여 선택된 회원 정보를 삭제합니다.

- 전체회원 리스트 내보내기: 회원리스트 전체 선택 시, 혹은 전체 체크가 해제된
 상태에서
 아이콘을 선택하면, 전체 회원 리스트를 엑셀로 저장할 수 있습니다.

 - 일부 회원 리스트 내보내기: 회원리스트에서 복수의 회원 선택 후,
 ◆ 아이콘을 선택하면, 선택된 회원 리스트를 엑셀로 저장할 수 있습니다.

해당 회원리스트에서 내보내기는 현재의 회원리스트 항목의 정보들이 엑셀에
 저장됩니다. 내보래기에서 저장 항목 변경은 환경 설정하기>회원리스트 사용자 지정
 에서 회원리스트의 항목을 변경하시면 됩니다.

회원 검색하기

• 회원의 이름, 그룹명, 회원 ID 로 회원 검색이 가능합니다.



센터 정보 관리하기

• 홈 화면 오른쪽 상단의 센터이름>센터정보를 선택합니다.



• 센터 정보 화면에서 비밀번호, 센터이름, 센터 주소 및 전화번호, 이메일, 로고를 수정할 수 있습니다.

• 아이디는 변경할 수 없습니다.

• 이메일은 사용하시는 다른 이메일로 변경 가능합니다. 이메일 정보는 센터 아이디와 비밀번호 찾기 시 이용되므로, 반드시 유효한 이메일을 입력해주십시오.

• 센터정보의 로고는 296x70 사이즈에 적합한 JPG, JPGE, PNG, GIF 파일을 등록합니다.

• 센터 계정 탈퇴는 제공하지 않으며, 프로그램을 삭제 시, 계정과 회원 정보는 자동 삭제됩니다. 클라우드 가입형의 경우, 가입 중지 및 탈퇴, 계정 및 회원정보 삭제는 구매하신 영업사원 혹은 jw@jawon.com 으로 연락해주십시오.

센터 로그인 하기

• 센터 계정 등록 시 입력하신 아이디와 비밀번호로 로그인 하실 수 있습니다.

• **로그인 상태 유지** 체크박스를 선택하시면, 다음 프로그램 실행부터 로그인 정보 입력 없이 바로 사용할 수 있습니다.

• 로그아웃은 오른쪽 상단의 센터이름>로그아웃을 선택하면 로그인 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

센터 계정 아이디 찾기

- 로그인 화면 하단의 아이디 찾기를 선택합니다.
- 등록된 센터 이름과 이메일을 입력하시면, 해당 정보로 등록된 아이디를 확인 가능합니다.

센터 계정 비밀번호 찾기

• 로그인 화면 하단의 비밀번호 찾기를 선택합니다.



• 로그인 아이디와, 등록된 이메일을 입력하시면, 등록된 이메일로 임시 비밀번호를 송부드립니다.

• 이메일로 전송된 임시 비밀번호를 입력하면, 로그인하실 수 있습니다.

• 해당 비밀번호는 로그인 후, 반드시 홈 화면 상단 센터정보를 이용하여 비밀번호를 변경해주십시오.



• 환경 설정은 홈 화면 오른쪽 상단 센터이름>환경설정을 선택합니다.



회원리스트 사용자지정

- 홈 화면의 회원리스트에 보이는 정보를 설정할 수 있습니다.
- 회원리스트에 추가하고자 하는 정보를 왼쪽에서 선택 후, 오른쪽으로 📀 합니다



합니다.

- 회원리스트에 제거하고자 하는 정보는 오른쪽에서 선택 후, 왼쪽으로 🏾 🕓
- 설정 후, 적용 버튼을 눌러 저장합니다.

USB 장비 연결

- USB 연결된 USB 장비 목록을 보여줍니다.
- 연결하고자 하는 장비를 선택합니다.
- 연결이 완료되면, 장비연결 아이콘이 🖬 변경됩니다.

버전

- 현재 ACCUNIQ MANAGER 의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
- 업데이트를 통해 항상 최신 버전으로 사용하시길 바랍니다 (업데이트 시, 인터넷 연결 필요)



추가 정보

ACCUNIQ MANAGER 에 문제가 있거나 임상관련 질문이 있다면 아래의 연락처로 문의하세요.

- ㈜셀바스헬스케어 서울 영업관리 사무소/AS

서울특별시 서초구 고무래로 10 길 26,반도 B/D 8 층 Tel) 02-587-4056 Fax) 02-588-1937

- ㈜셀바스헬스케어 고객지원센터

http://jawon.com/korean/cus/bpmlistkr_as.html jw@jawon.com

저작권 법에 따라 ACCUNIQ MANAGER 사용 설명서는 ㈜셀바스헬스케어의 동의 없이 전체 또는 일부를 무단 복사, 복제, 번역 또는 다른 매체 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용 설명서는 사전통보 없이 내용이 변경 될 수 있습니다. ㈜셀바스헬스케어는 본 사용 설명서에 기재된 내용을 준수하지 아니하여 발생한 모든 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

